

SHARPAK™ Instructions d'assemblage

Pour l'assemblage, placez les composants sur une surface stable et solide

1



Orientez le couvercle en veillant à ce que le mot 'FRONT' soit du côté de l'étiquette ...

2



... placez maintenant le couvercle sur la base en veillant à ce que la lèvre intérieure du couvercle soit insérée dans la base ...

3



... MAINTENANT appuyez à tour de rôle sur chacun des coins pour engager le couvercle fermement dans la base. Prenez bien soin de vérifier que les cliquets de fixation latéraux sont aussi engagés.

4 'clics' et la boîte est assemblée!


SHARPAK™
HEALTHCARE





SHARPAK™ PLUS avec VisiLOCK Procédure de fermeture

Suivez les étapes 1 à 4 pour assurer la bonne fermeture et le verrouillage de la boîte


1 ouverte

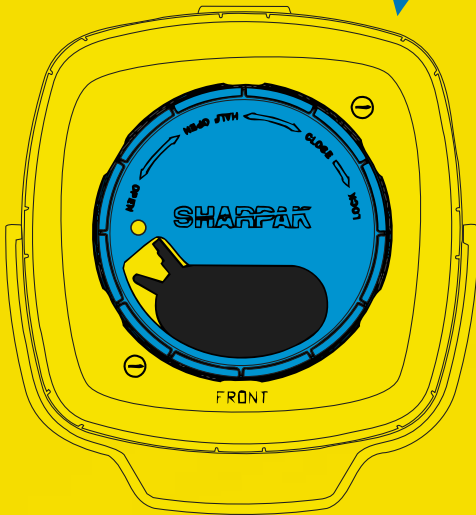

2 entrouverte

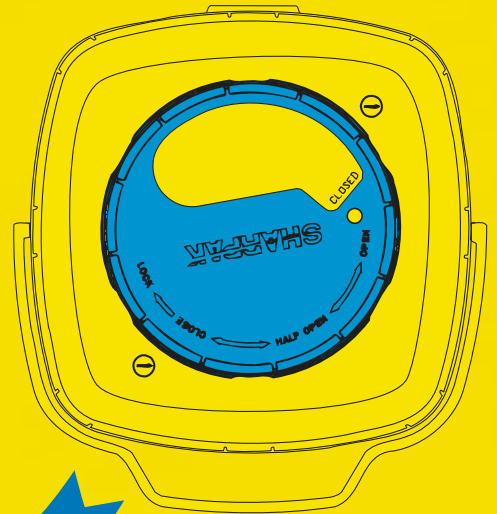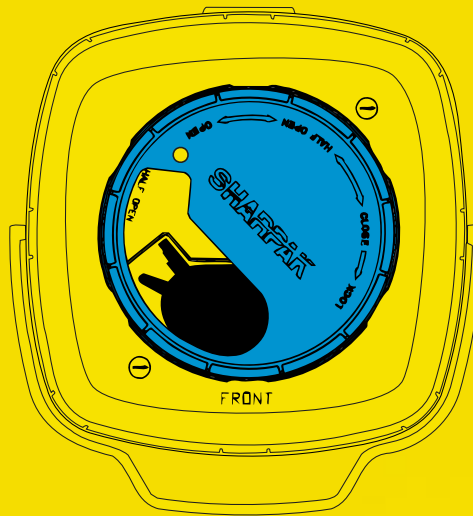

3 1er Clic
Fermeture

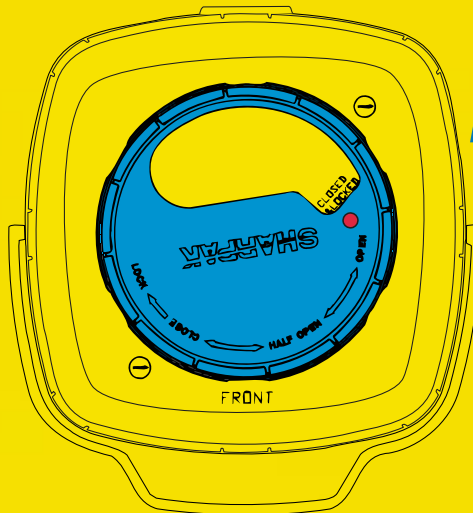

4 2eme Clic
Verrouillage



VisiLOCK
PATENTED

Amcor Flexibles/SPS Laboratoires
5, rue de Montigny - ZI - BP 170
77527 COULOMMIERS Cedex - France
Tel: +33 (0)1 64 75 60 00
Fax: +33 (0)1 64 75 60 07
sps.info@amcor-flexibles.com

SPS
LABORATOIRES

AF
AQ
ISO 9001
VERSION 2000