

121°C
134°C

121°C
134°C



La gamme de boîtes SHARPAK est accréditée à la norme BS7320:1990 et elle a été testée et accréditée en conformité avec les dispositions des Recommandations des Nations Unies sur le Transport des Produits Dangereux, Chapitre 9.

Sterilisation à la vapeur

Les boîtes pour déchets à risques SHARPAK® sont fabriquées en polypropylène et sont donc capables de résister à une stérilisation par autoclave à 121°C pendant 15 minutes ou à 134°C pendant 4 minutes sans déformation notable. Il est à noter qu'en raison des phénomènes d'humidité dans le procédé de stérilisation à la vapeur d'eau, il existe un risque de déformation et/ ou de décollement des étiquettes apposées sur les collecteurs. Il est possible d'éviter ce phénomène en fixant sur l'étiquette, une bande adhésive fréquemment utilisée pour la fermeture des packs en stérilisation.

L'accréditation UN fut accordée après que les boîtes aient été testées en conformité avec les exigences telles que décrites dans la norme UN3291, laquelle ne stipule aucune recommandation quant à la stérilisation des collecteurs utilisés.

Les "Recommandations sur le Transport des Produits Dangereux", Division 6.2 Substances Infectieuses, Section 6.9.7 stipulent:

"Les déchets transportés aux termes de la norme UN3291 sont des déchets dérivés du traitement médical des personnes ou des animaux ou de la recherche biologique pour lesquels la probabilité de la présence de substances infectieuses est faible. Le code UN2814 ou UN2900 doit

être attribué aux produits infectieux qui peuvent être spécifiés en tant que tel. Les déchets décontaminés qui contenaient initialement des substances infectieuses doivent être considérés comme non dangereux sauf s'ils répondent aux critères d'une autre classe."

Les numéros UN sont définis comme suit:

UN 3291 - DECHETS HOSPITALIERS NON SPECIFIES N.O.S.
OU DECHETS (BIO) MEDICAUX N.O.S.
OU DECHETS MEDICAUX REGLEMENTES N.O.S.

UN 2814 - PRODUITS INFECTIEUX AFFECTANT
LES PERSONNES

UN 2900 - PRODUITS INFECTIEUX AFFECTANT
LES ANIMAUX

Amcor Flexibles/SPS Laboratoires
5, rue de Montigny - ZI - BP 170
77527 COULOMMIERS Cedex - France
Tel: +33 (0)1 64 75 60 00
Fax: +33 (0)1 64 75 60 07
sps.info@amcor-flexibles.com